

COVID-19 Antigen Schnelltest (nasal)

Schritt 1: Vorbereitung

- Material bereitlegen
- bei Bedarf schnäuzen
- Hände desinfizieren




Schritt 2: Vorbereitung

- Testkassette öffnen
- Röhrchen mit Pufferlösung und Spenderkappe bereitlegen
- Tupfer aus Packung nehmen
- Papiertuch bereitlegen

Schritt 3: Nasenabstrich


- Kopf nach hinten neigen
- Tupfer ca. 2cm einführen
- Tupfer 4x drehen (ca. 15 sec.) an der Naseninnenseite
- Im anderen Nasenloch gleich vorgehen

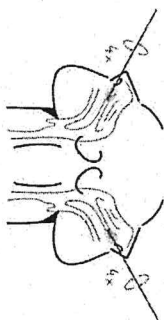

Linkes und rechtes Nasenloch


Schritt 4: Tupfer in Röhrchen

- Röhrchen in die andere Hand nehmen und Deckel nach oben schieben
- Tupfer in die Lösung stecken
- Röhrchen drücken
- Tupfer ca. 10mal drehen
- Tupfer unter Druck entfernen und auf Papiertuch ablegen

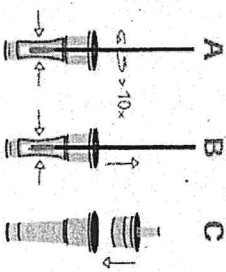

Schritt 5: Tropfen auf Teststreifen geben

- Spenderkappe auf Röhrchen setzen
- 4 Tropfen auf Teststreifen geben, 15 min. warten

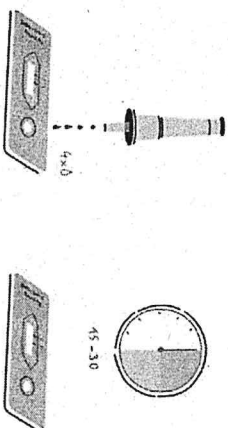

Schritt 6: Ergebnis ablesen

C=Kontrolllinie

T=Testlinie




Test ist negativ = **kein Hinweis** auf Infektion mit SARS-CoV2



Test ist positiv = Infektion mit SARS-CoV2




Test ist ungültig = Wiederholung sofort notwendig

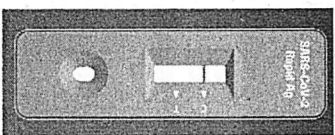

Bitte anschließend Hände desinfizieren und alle Materialien in die vorbereiteten Müllimer werfen!

Verpackungsbeutel und Trockennittel

Teststreifen

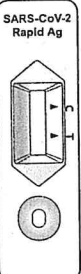

Steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean, P/N 93050)

Extraktionspuffer Röhrchen und Spenderkappe

